


JETZT MIT
VERBESSERTEN
FEATURES



VIELSEITIGER SCHUTZ BEI STUHL- INKONTINENZ MIT FLEXI-SEAL™ PROTECT PLUS



Stuhl drainage-System mit ENFit™-Konnektor
C. difficile wirksam isolieren
Effektives Druckgeschwürmanagement
Privatsphäre und Würde von Patient:innen schützen

SO SETZEN SIE DAS SYSTEM EIN

Wir erklären schrittweise, wie Sie Flexi-Seal™ Protect Plus einsatzfähig machen, den sichtbaren Unterschied der Ports, der Ballon eingeführt und mit Wasser befüllt wird sowie das Abklemmen und Tauschen des Auffangbeutels. Klicken Sie rein!



zum Video



© Convatec

STUHLINKONTINENZ: BAKTERIEN ISOLIEREN UND WÜRDEVOLL MANAGEN.

Das verbesserte Stuhlmanagement-System zur Infektionskontrolle

Akute Stuhlinkontinenz bei Intensivpatient:innen birgt einerseits eine Vielzahl an klinischen Risiken, schränkt die Würde und Lebensqualität der betroffenen Patient:innen maßgeblich ein und ist andererseits mit erhöhten Kosten aufgrund eines verlängerten Krankenhausaufenthalts verbunden. Infektionen und Kreuzkontaminationen durch nosokomiale Krankheitserreger wie *C. difficile* tragen folglich zur Entstehung von klinischen Ereignissen bei. Betroffene Patient:innen können von einer unkomplizierten Diarrhoe über Hautschäden und Druckgeschwüren bis hin zu lebensbedrohlichen Folgen eine Vielzahl an Erkrankungen entwickeln.

Mit Flexi-Seal™ Protect Plus steht Ihnen ein Stuhlmanagement System mit innenliegendem Katheter zur Verfügung, das eine **sichere, effektive und würdige Lösung zur Ableitung von halbflüssigem und flüssigem Stuhl** darstellt. Zusätzlich ermöglicht es die **standardisierte rektale Medikamentenverabreichung**.

Das System umfasst

- einen sich automatisch verschließenden Katheter,
- eine Luer-Lock-Spritze zum Blocken bzw.
- einen ENFit™ Anschluss als Medikamenten- und Spülport,
- gelbildende Diamonds™ Sachets zur Geruchskontrolle und
- einen einzigartigen Protect Indikator zum Schutz vor Überfüllung des Ballons.

Flexi-Seal™ Protect Plus bündelt medizinische, budgetäre und ethische Aspekte:

- wirksame Infektionskontrolle bei Infektionen durch flüssigen bzw. halbflüssigen Stuhl
- effektives Druckgeschwürmanagement
- Vermeidung verlängerter Krankenhausaufenthalte aufgrund von Infektionen und Bakterienbefall
- Reduktion von Behandlungskosten
- geruchsabsorbierende Technologie
- mehr Privatsphäre und Lebensqualität für betroffene Patient:innen
- höhere Zufriedenheit des pflegenden Personals

PRODUKTVERBESSERUNGEN, DIE IHRE ARBEIT SPÜRBAR ERLEICHTERN



Diskonnektieren mit automatischem Verschluss des Katheterschlauches
Um das Auslaufen von Stuhl beim Diskonnektieren zu verhindern, wurde der Verschluss zwischen dem Katheterschlauch und dem Auffangbeutel wesentlich verbessert. Beim Trennen der Verbindung verschließt sich der Katheterschlauch automatisch.



Perfekte, anatomiegerechte Drucküberwachung mittels neuem Ampelindikator
Die Drucküberwachung im Ballon bzw. Cuff kann durch den Ampelindikator perfekt überwacht und gesteuert werden. Sobald der anatomiegerechte Druck erreicht ist, poppt der grüne Ampelindikator sichtbar auf. Wenn Sie zu viel Wasser eingebracht haben, poppt der rote Indikator auf. Achten Sie auf die Indikatoren außerdem bei der Mobilisierung Ihrer Patient:in.

Wussten Sie?

Je besser der Druck im Ballon an die Anatomie angepasst wird, desto dichter wird das System. Damit verringert sich automatisch auch das Verletzungsrisiko im Rektum. Für die meisten Patient:innen reicht eine Füllmenge von 37ml aus!



Keine Verwechslungsgefahr der Ports

Die Ports zum Blocken und Irrigieren bzw. Spülen wurden optisch und technisch getrennt, um eine Verwechslung auszuschließen. Zum Blocken des Systems verwenden Sie eine Luer-Lock-Spritze. Eine ENFit™-Spritze wird zum Spülen bzw. zur rektalen Medikamentenverabreichung eingesetzt.




Diamonds™ als Superabsorber zur Geruchskontrolle

Optional können Sie direkt in den Auffangbeutel den gelbildenden Superabsorber Diamonds™ einbringen. Die Diamonds sind dem Auffangbeutel beige-packt und können bei Bedarf einfach in diesen eingeworfen werden.

BEWÄHRTE FEATURES, DIE SIE BEREITS KENNEN



Fingertasche am Ballon, zum leichteren Einführen in das Rektum

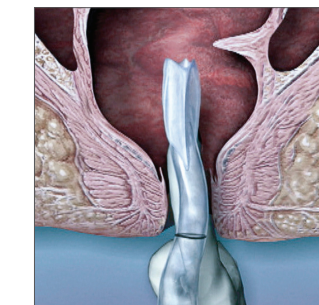

Schlauchklemme, um sicherzustellen, dass keine Flüssigkeit in den Katheter zurückfließt



DAS HEINTEL GRUPPE EXPERTENTEAM BERÄT SIE GERNE PERSÖNLICH!

Bestellinformationen

Produkt	Bestelleinheit	Art. Nr.
Flexi-Seal™ Protect Plus	1 VE = 1 Stück	MM421703
Auffangbeutel Privacy	1 VE = 5 Stück	MM422291

RUDOLF HEINTEL MEDIZINTECHNIK GMBH

Erdbergstraße 166, 1030 Wien
T +43 (1) 403 89 56-0
F +43 (1) 403 89 56-50
medizintechnik@heintel.at

IMPRESSUM

Medieninhaber: Rudolf Heintel Medizintechnik GmbH
Textgestaltung: © Heintel und Convatec
Grafik | Design | Reinzeichnung: Rudolf Heintel Medizintechnik GmbH
Produktbilder: © Convatec

Die Unterlage wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und die Daten überprüft.
Satz- und Druckfehler können dennoch nicht ausgeschlossen werden.
Version 1.0 | Stand: Juni 2023