

Main-Lock Set

Pflasterfixierung für Katheter und Drainagen

Das hautfreundliche Pflaster mit Klettverbinder dient der sicheren Fixierung langzeitangewendeter Katheter- und Drainagenschläuche und somit der Zugentlastung an der Einstichstelle zur Reduzierung katheterassoziierter Infektionen. Das Set besteht aus zwei Komponenten, einem hautfreundlichen, atmungsaktiven Pflaster mit Flauschoberfläche und der Schlauchfixierung Main-Lock.

2 |



Die Pflasterfixierung ist in zwei Größen erhältlich:

	Breite	Länge	VE	REF
1 Main-Lock Set 10	4 cm	10 cm	40 St	90-30-15
2 Main-Lock Set 14	4 cm	14 cm	40 St	90-30-20



Die Pflasterfixierung kann überall dort eingesetzt werden, wo klebefreie Fixierungen nicht anzuwenden oder nicht gewünscht sind. Durch die knickfreie Führung des Katheter- bzw. Drainagenschlauches ist auch die schmerzfreie, ungehinderte Verabreichung vasoaktiver Substanzen sowie die korrekte Messung zentralvenöser Daten gesichert.

Anwendungsgebiete:

Sicherung von ZVKs, Drainagen, Kathetern und Sonden

Bereiten Sie die Haut des Patienten vor Anwendung der Pflaster gemäß Ihrer Standard-Krankenhausrichtlinien vor.


ACHTUNG:

Entfernen Sie das Pflaster bei allergischen Unverträglichkeiten und Hautreaktionen wie entzündlichen Anzeichen.


Setzen Sie bei Bedarf mehrere Main-Lock Set ein.




its-novo.de

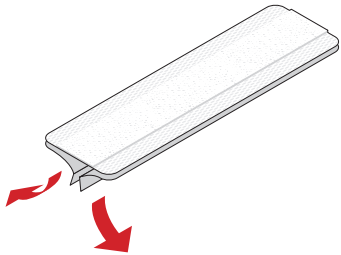


1 | Entfernen Sie die Papierschutzschicht der Klebefläche und kleben Sie das Pflaster auf die gewünschte Körperstelle.

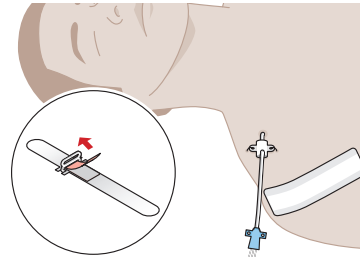


2 | Lösen Sie beim Main-Lock die rosafarbene Schutzfolie der Gelschicht.

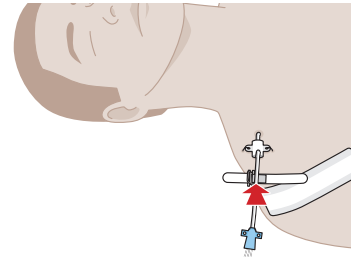

3 | Legen Sie den Katheter- bzw. Drainagenschlauch auf die Gelschicht. Zur optimalen Zugentlastung wird der Schlauch nicht stramm, sondern in einem leichten Bogen auf die Gelschicht gelegt.

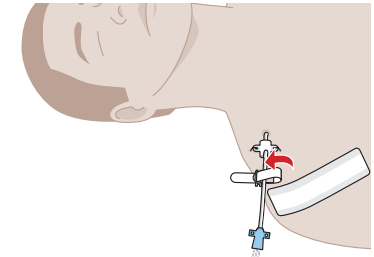

4 | Nehmen Sie das längere Ende des Main-Lock und ziehen Sie dieses durch die Öse.

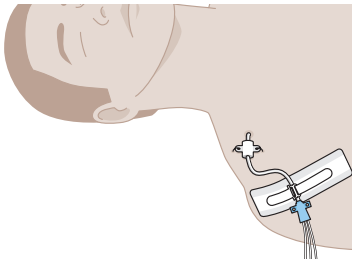

5 | Kletten Sie Main-Lock nun in gewünschter Höhe auf die Flautoberfläche des Pflasters.

Fertig angelegte Fixierung.