

Nasal-Fix

Nasale Fixierung für Sonden



Nasal-Fix ist eine hautfreundliche Pflasterfixierung zur Sicherung von nasalen Sonden bei Jugendlichen und Erwachsenen. Nasal-Fix kann sowohl bei einlumigen (Levin) als auch bei doppellumigen (Salem Sump) Sonden eingesetzt werden. Die Handhabung ist einfach und die Pflasterfixierung ist zügig anzulegen.

Nasal-Fix ist in einer Ausführung erhältlich:


	Beschreibung	VE	REF
1 Nasal-Fix	für alle gängigen Sondengrößen	80 St	100-200-01




Achtung:

Entfernen Sie das Pflaster bei allergischen Unverträglichkeiten und Hautreaktionen wie entzündlichen Anzeichen.

Bereiten Sie die Haut der Nase gemäß Ihren Krankenhaus-Standardrichtlinien vor. Für eine bessere Haftung des Pflasters sollte die Haut vor der Anwendung entfettet, gesäubert und getrocknet werden. Warten Sie nach dem Auftragen des Pflasters einige Sekunden, so dass das Pflaster seine optimale Haftung auf der Haut entfalten kann.

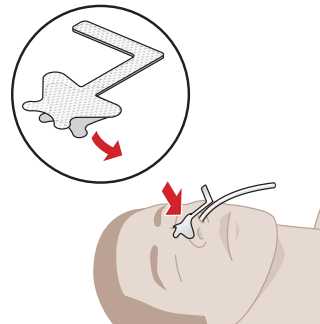

1 | Entfernen Sie die Schutzfolie und platzieren Sie das Pflaster mit dem oberen Teil auf dem Nasenrücken.

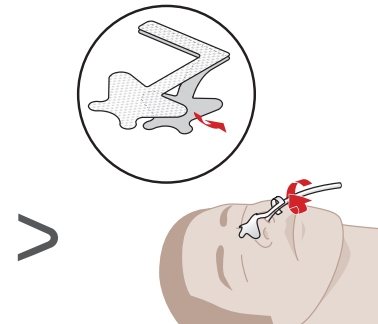

2 | Wickeln Sie das untere Ende des Pflasters spiralförmig und in Richtung Nasenspitze um die Sonde.



3 | Fertig angelegte Fixierung.

