


# Novo-Pad | Novo-KidsPad

## Tracheal-Schaumkompressen

Novo-Pad | Novo-KidsPad sind besonders weiche, hautfreundliche und saugfähige Stomaauflagen. Sie bestehen aus einem hydrophilen Polyurethanschaum, der neben einer guten Polsterung vor allem für den idealen Transport von Wundsekret sorgt. Die hautfarbene Deckschicht der latex- und klebefreien Kompresse ist semipermeabel. Nach und nach wird die absorbierte Feuchtigkeit von der Oberfläche abtransportiert, ohne dass dabei ein flächiges Durchschlagen des Sekrets auf der Deckschicht erfolgt. Ein Austausch der Gase ist gegeben. Novo-Pad | Novo-KidsPad sorgen für ein optimales Wundmilieu, beugen Irritationen vor und bieten Ihnen und Ihrem Patienten eine moderne Stomaversorgung.

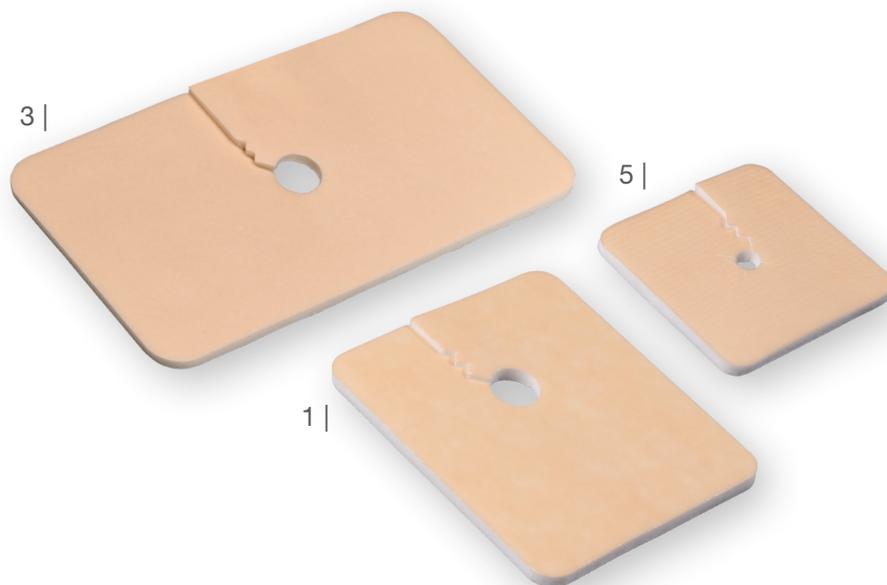

Novo-Pad und Novo-KidsPad sind in folgenden Größen erhältlich:

	Breite	Länge	VE	REF
1   Novo-Pad	8,2 cm	9,5 cm	25 St	70-10
2   Novo-Pad	8,2 cm	9,5 cm	10 St	70-10-10
3   Novo-Pad 2	14 cm	8 cm	25 St	70-30
4   Novo-Pad 2	14 cm	8 cm	10 St	70-30-10
5   Novo-KidsPad	6,5 cm	6,5 cm	25 St	70-20
6   Novo-KidsPad	6,5 cm	6,5 cm	10 St	70-20-10



Die Verwendung der Kompressen fördert die Wundheilung. Sie sollten solange wie möglich am Patienten verbleiben, um Irritationen der Wunde zu reduzieren.

Die Kompressen sind besonders für frisch operierte, gereizte oder stark nässende Tracheostomata geeignet. Für alle gängigen Kanülenschilder.

### Achtung:

Entfernen Sie die Kompresse bei allergischen Unverträglichkeiten und Hautreaktionen wie entzündlichen Anzeichen. Nur anzuwenden bei intakter Verpackung. Einmalprodukt, eine Wiederverwendung kann zur Kontamination und dem Verlust der Produkteigenschaften führen, die Infektionen, Sekundärschäden und den Tod des Patienten zur Folge haben können.


### Kompressenwechsel:

In Abhängigkeit des Sekretflusses ist ein regelmäßiger Wechsel der Kompresse vorzunehmen. Bei viel Exsudat wechseln Sie alle 24 Stunden, bei wenig Sekretfluss alle zwei bis drei Tage. Ist die Aufnahmefähigkeit der Kompresse erschöpft, ist diese sofort zu wechseln.




its-novo.de


## Novo-Pad

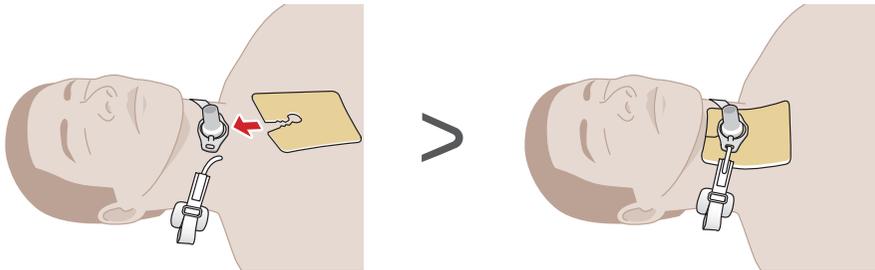

Angelegte Kompresse mit der Trachealkanülenfixierung BePa-Clip® VARIO 30/H.

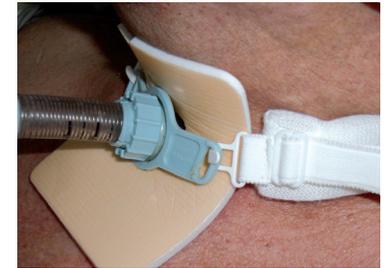


## Novo-KidsPad

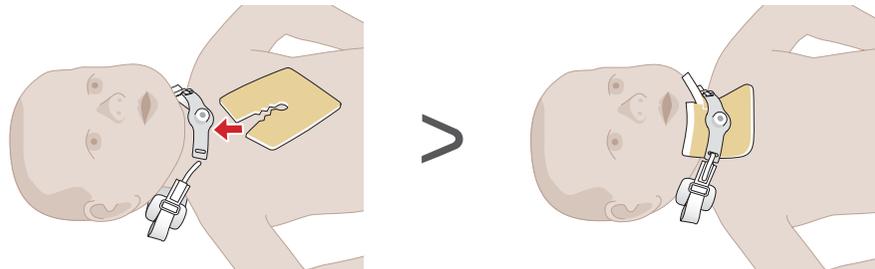

1 | Reinigen Sie die Wunde mit sterilen Tüchern und trocknen Sie die betroffenen Hautpartien. Legen Sie die Kompresse mit der **weißen** Materialseite zur Haut gerichtet um die Kanüle.

2 | Fertig angelegte Kompresse. Die Kompresse kann ohne Traumatisierung entfernt werden, der Schaum haftet nicht an Epithelien. Nekrosen sollten vor dem Anlegen entfernt werden.

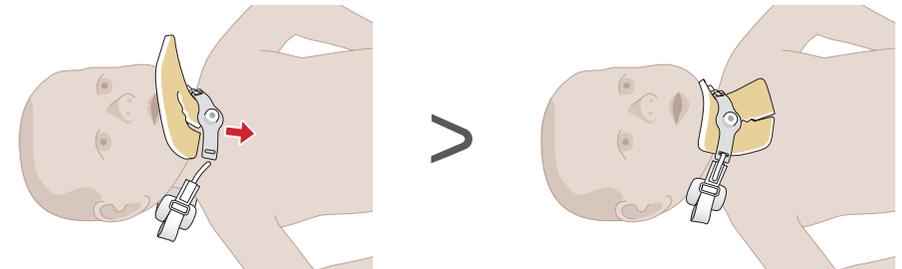

1 | Bei Bedarf kann die Kompresse auch von oben angelegt werden, um eine flächige Polsterung am Kinn zu erreichen.

2 | Fertig angelegte Kompresse.