

TuBo-Fix

Zweiteiliges Fixierband für Endotrachealtuben

TuBo-Fix ist ein zweiteiliges Band zur oralen Fixierung von Endotrachealtuben bei Erwachsenen, Jugendlichen und Schulkindern.



Bei Verschmutzung kann das Mittelteil separat ausgetauscht werden.

Das Nackenpolster kann längere Zeit am Patienten verbleiben.

Anwendungsgebiete:

Endotrachealtuben, Doppellumentuben, Larynxmasken

Beschreibung

	Beschreibung	VE	REF
1 TuBo-Fix	Nackenpolster, Mittelteil, 1 St Fingerlift	40 St	20-10
2 TuBo-Fix 1	Nackenpolster, Mittelteil, 1 St Fingerlift geklebt	40 St	20-10K
3 TuBo-Fix 2	Nackenpolster, Mittelteil, 2 St Fingerlift geklebt	40 St	20-10-02
4 TuBo-Fix 3	Nackenpolster, Mittelteil, 1 St Fingerlift 100 St Fingerlift extra	40 St	20-10-03
5 TuBo-Fix 4	Nackenpolster, Mittelteil 40 St Klebeklett	40 St	20-10-TS
6 TuBo-Fix 5	Nackenpolster, TuBo-Lock Mittelteil, 1 St Fingerlift geklebt	40 St	20-10-05
7 TuBo-Fix Mittelteil	26 cm Länge, 1 St Fingerlift	80 St	20-11
8 TuBo-Fix Mittelteil 3	26 cm Länge, 1 St Fingerlift 100 St Fingerlift extra	80 St	20-11-03
9 TuBo-Fix Mittelteil XL	34 cm Länge, 1 St Fingerlift	80 St	20-12
10 TuBo-Fix Mittelteil 3, XL	34 cm Länge, 1 St Fingerlift geklebt	80 St	20-12-03
11 TuBo-Fix Nackenpolster	32,5 cm Länge	80 St	20-15



- > schnelle, einfache und sichere Handhabung
- > klebefrei – ideal bei Barträgern und Schwerstbrandverletzten
- > geringe Materialdichte (weniger als 30 % liegen auf der Haut), Dekubitusschutz
- > latexfrei – hypoallergen
- > formstabil – auch bei längerer Tragezeit
- > individuell kürzbar – Fixierung für alle Patienten geeignet, auch für Pädiatrie
- > anwenderfreundlich – auch mit Handschuhen leicht anzulegen
- > ökonomisch – bei Verschmutzung nur Mittelteil auszutauschen



its-novo.de

GEBRAUCHSANWEISUNG

TuBo-Fix

ITSNOVO®



1 | Legen Sie das Nackenpolster mit der weißen Baumwollseite zur Haut gerichtet um den Nacken des Patienten. Kürzen Sie ggf. das Polster.



2 | Fixieren Sie den Fingerlift-Klebestreifen auf der Innenseite des Mittelteils oder direkt um die zuvor gesäuberte Tube. Entfernen Sie die Schutzfolie.



3 | Möglichkeit A.
Kreuzen Sie die Enden des Mittelteils 1x um die Tube.



3 | Möglichkeit B.
Legen Sie das Mittelteil als Schlaufe um die Tube, indem Sie das längere Ende durch die Schlitzlochung ziehen.



4 | Befestigen Sie die Enden des Mittelteils unter Zug mit dem Klebstreifen auf dem Nackenpolster. Ein Nachfixieren ist jederzeit möglich.



5 | Fertig angelegte Fixierung.
Bei Verschmutzung kann das Mittelteil separat ausgetauscht werden. Das Nackenpolster kann länger am Patienten verbleiben.