

TuBo-Grip

Zweiteiliges Fixierband für Endotrachealtuben

TuBo-Grip ist ein zweiteiliges Band zur Fixierung von Endotrachealtuben bei Erwachsenen, Jugendlichen und Schulkindern. Die auf dem Gummiband aufgebrachte Silikonspur krallt sich auf dem Tubus fest und bietet auch bei stark speichelnden Patienten Halt. Im Nacken ist das Band weich gepolstert und daher besonders für empfindliche Haut geeignet.



TuBo-Grip besteht aus einem Nackenpolster und einem Mittelteil. Das Nackenpolster ist in zwei unterschiedlichen Längen erhältlich:

	Beschreibung	VE	REF
1 TuBo-Grip		60 St	20 - 50
2 TuBo-Grip XL		60 St	20 - 51
3 TuBo-Grip Nackenpolster	Länge 32 cm, Breite 2,5 cm	60 St	20 - 52
4 TuBo-Grip Nackenpolster XL	Länge 47 cm, Breite 2,5 cm	60 St	20 - 53
5 TuBo-Grip Mittelteil	Länge 33 cm, Breite 1,8 cm	60 St	20 - 55



- > schnelle, einfache und sichere Handhabung
- > sicher – besonders starker Halt durch Silikonspur + Zugkraft des Gummibands
- > klebefrei – ideal bei Barträgern und Patienten mit Problemhaut
- > latexfrei – hypoallergen, Dekubitusschutz
- > formstabil – auch bei längerer Tragezeit durch breites, komfortables Polster
- > leicht absorbierend – kein Funktionsverlust
- > Nachfixierung jederzeit möglich
- > individuell kürzbar – Fixierung für alle Patienten geeignet
- > ökonomisch – bei Verschmutzung nur Mittelteil austauschen

Anwendungsgebiete:

Endotrachealtuben, Doppellumentuben, Larynxmasken



GEBRAUCHSANWEISUNG

TuBo-Grip

ITSNOVO®



1 | Legen Sie das Nackenpolster hinter den Kopf des Patienten, so dass ein Ende über dem Ohr, das andere Ende unter dem anderen Ohr endet.

2 | Platzieren Sie ein Ende des Gummibandes mit der Silikonseite von oben auf dem zuvor gesäuberten Tubus.

3 | Wickeln Sie das Gummiband unter kräftigem Zug einmal um den Tubus.

4 | Gehen Sie mit dem Gummiband unter kräftigem Zug ein weiteres Mal so um den Tubus herum, dass sich das Gummiband an der Unterseite des Tubus kreuzt.



5 | Sie haben genug Zug auf das Gummiband gebracht, wenn es den Tubus komplett umfasst. Das weiche Polster liegt mit der weißen Seite auf der Haut bzw. in den Mundwinkeln.

6 | Befestigen sie die Enden des Mittelteils unter Zug mit den Klebstripfen auf dem Nackenpolster.
Fertig angelegte Fixierung.