

TuBo-Lock Set

Fixierung für Endotrachealtuben

TuBo-Lock Set ist eine dreiteilige Fixierung für Endotrachealtuben bei Erwachsenen, Jugendlichen und Schulkindern, die aus zwei hautfreundlichen Fixierpflastern und einem Mittelteil besteht.

Das TuBo-Lock Mittelteil wird mit einem Fingerlift-Klebestreifen fest mit dem Tubus verbunden und zur maximalen Sicherheit zudem als Schlaufe um den Tubus gelegt. Es ist kürzbar und kann somit der Gesichtsform und dem Umfang individuell angepasst werden. Bei Verschmutzung wird nur das Mittelteil ausgetauscht, während die Fixierpflaster längere Zeit am Patienten verbleiben können.

Ein Umlagern des Tubus ist durch die Klettverbindung jederzeit zügig durchzuführen. Durch die vertikale Klettausrichtung erhalten Sie die größtmögliche Klettfläche für die Anbringung des Mittelteils. Bei den TuBo-Lock Fixierpflastern vermeidet die mittige Platzierung des modernen Kletts auf den weichen Schaumplatten den direkten Hautkontakt und verhindert so Irritationen und Sekundärschäden.



its-novo.de



	Beschreibung	VE	REF
1	TuBo-Lock Set	2 St Fixierpflaster, Mittelteil, Fingerlift	80 St 25-10
2	TuBo-Lock Set XL	2 St Fixierpflaster, Mittelteil XL, Fingerlift	80 St 25-11
3	TuBo-Lock Set 1, XL	2 St Fixierpflaster, Mittelteil mit Klebeklett	80 St 25-11-10
4	TuBo-Lock Set 2	2 St Fixierpflaster, Mittelteil mit Silikonspur	80 St 25-12
5	TuBo-Lock Mittelteil	28 cm Länge, Fingerlift	80 St 25-15
6	TuBo-Lock Mittelteil XL	36,5 cm Länge, Fingerlift	80 St 25-16
7	TuBo-Lock Mittelteil 1, XL	36,5 cm Länge, Klebeklett	80 St 25-16-10
8	TuBo-Lock Mittelteil 2	33 cm Länge, mit Silikonspur	80 St 25-14
9	TuBo-Lock	Fixierpflaster	80 St 25-10-01



- > schnelle, einfache und sichere Handhabung
- > hautfreundliche Materialien
- > maximale Sicherheit
- > lange Verweildauer der Wangenpflaster
- > ökonomisch - Mittelteil separat austauschbar

ACHTUNG



Entfernen Sie die Fixierpflaster bei allergischen Unverträglichkeiten und Hautreaktionen wie entzündlichen Anzeichen. Einmalprodukt, eine Wiederverwendung kann zur Kontamination und Verlust der Produkteigenschaft führen, die Infektionen, Sekundärschäden und den Tod des Patienten zur Folge haben können.

GEBRAUCHSANWEISUNG

TuBo-Lock Set




TuBo-Lock Set | Anwendungsbeispiel

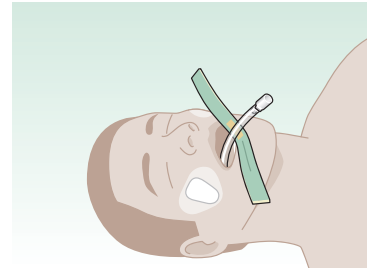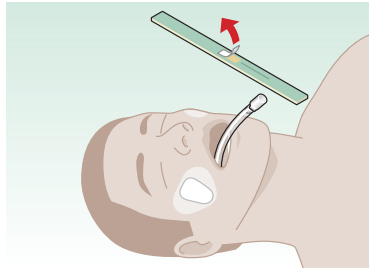

1 | Bereiten Sie die Haut gemäß Ihrer Standard-Krankenhausrichtlinien vor. Kleben Sie die Fixierpflaster auf die Wangen des Patienten, so dass der Klett in der Länge zum Körper zeigt.

2 | Kleben Sie das Mittelteil, nah am Schlitz, von unten auf den Tubus.



Entfernen Sie die Papierschutzschicht vom Klebestreifen des Mittelteils.

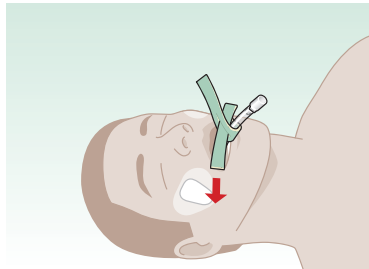

3 | Führen Sie das Ende des Fixierbandes durch die Schlitzlochung. Befestigen Sie nun die Enden des Mittelteils unter leichtem Zug auf den Klett der Fixierpflaster.



4 | Fertig angelegte Fixierung. Kürzen Sie das Mittelteil ggf. auf die benötigte Länge.

TuBo-Lock Set 2 | Anwendungsbeispiel

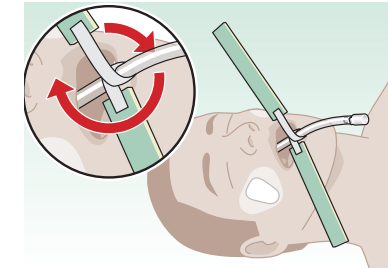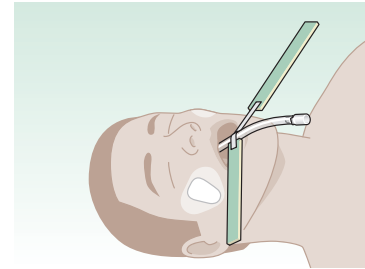

1 | Bereiten Sie die Haut gemäß Ihrer Standard-Krankenhausrichtlinien vor. Kleben Sie die Fixierpflaster auf die Wangen des Patienten, so dass der Klett in der Länge zum Körper zeigt. Platzieren Sie ein Ende des Gummibandes mit der Silikonseite von oben auf dem zuvor gesäuberten Tubus.

2 | Wickeln Sie das Gummiband unter kräftigem Zug einmal um den Tubus.

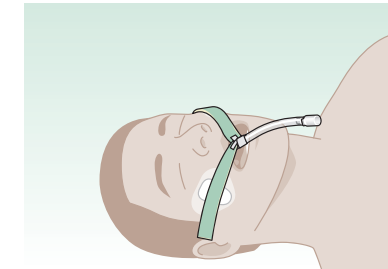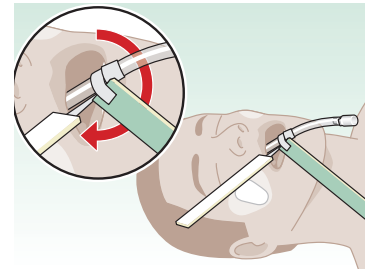

3 | Gehen Sie mit dem Gummiband unter kräftigem Zug ein weiteres Mal um den Tubus herum. Sie haben genug Zug auf das Gummiband gebracht, wenn es den Tubus komplett umfasst.

4 | Befestigen Sie nun die Enden des Mittelteils unter leichtem Zug auf dem Klett der Wangenpflaster. Fertig angelegte Fixierung.