


Oxy-Care | Ute-Fix

Polsterung für Schlauchsysteme

Oxy-Care | Ute-Fix sind komfortable, atraumatische Polsterungen zum Schutz empfindlicher Hautpartien. Sie können prinzipiell um jedes Schlauchsystem gelegt werden.

Zum Schutz der zarten Haut am Ohr bei der Anwendung von Sauerstoffnasenbrillen. Im Bereich der Atemunterstützung im Kindesalter wird Oxy-Care zur Unterpolsterung der Zuleitung und somit zum Schutz der empfindlichen Haut der Wangen eingesetzt.

Ute-Fix, eingesetzt bei Sonden und Drainagen, verhindert bzw. reduziert das Risiko von Ulzeration und Mazeration.

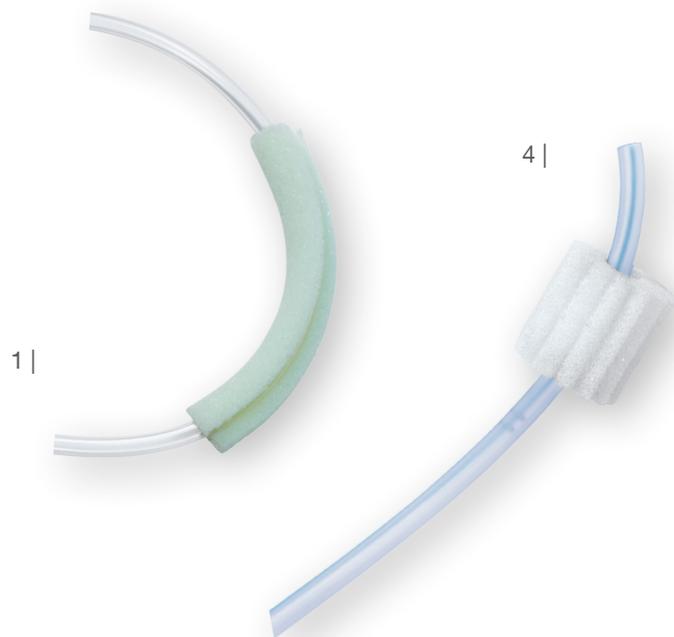

Oxy-Care ist in einer Größe erhältlich:

	Ø	Polsterlänge	VE	REF
1 Oxy-Care	1 cm	7 cm	120 St	40-10



Ute-Fix ist in drei Größen erhältlich:

	Ø	Polsterlänge	VE	REF
2 Ute-Fix 1	1,5 cm	2 cm	60 St	40-06
3 Ute-Fix 2	2 cm	2 cm	60 St	40-05
4 Ute-Fix 3	2,5 cm	2 cm	60 St	40-01



- > schnelle, einfache und sichere Handhabung
- > latexfrei – hypoallergen, Dekubitusschutz
- > Reduzierung des lokalen Drucks durch geringe Materialdichte
- > individuell kürzbar – für alle Patienten geeignet
- > anwenderfreundlich – auch mit Handschuhen leicht anzulegen
- > sowohl für Kliniken als auch für den HomeCare-Bereich geeignet



its-novo.de



1 | Ute-Fix 2

Klappen Sie die Polsterung auf und entfernen Sie die Schutzfolie der Klebebeschichtung auf der Innenseite.

2 |

Kleben Sie die Polsterung kurz vor dem Naseneingang um die zuvor gesäuberte Sonde.

3 |

Platzieren Sie die Sonde mit der Polsterung im Naseneingang.




Oxy-Care im HomeCare Bereich

Bei der Anwendung einer Sauerstoffnasenbrille schützt die Polsterung die empfindliche Haut am Ohr vor Scheuer- und Druckstellen.



Oxy-Care

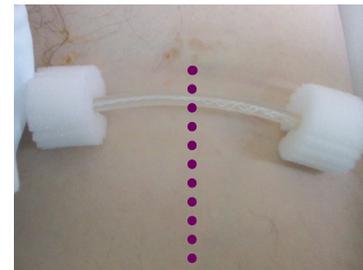

Druckstelle durch Tube

Ute-Fix 3

Zum Schutz der Haut vor Druck- und Scheuerstellen durch suprapubische oder transurethrale Katheter sowie Schlauchsysteme jeglicher Art.