

GEBRAUCHSANWEISUNG EVOLUTION KOPFPOSITIONIERER FÜR RÜCKENLAGE

HEINTEL
SICHER KOMPLETT VERSORGT

Für die Nutzung auf einer Operationstisch-Matte



VASVSH12
VASVSH14

Kopfpositionierer für Rückenlage, klein Modell 1
Kopfpositionierer für Rückenlage, groß Modell 1

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Anwendung des Positionierers. Das Produkt darf nur von geschultem Personal angewendet werden.
2. Wischen Sie das Produkt vor dessen Benutzung mit einem Desinfektionsmittel sauber.
3. Bewahren Sie den Positionierer vor dessen Nutzung sauber und trocken auf und stellen Sie ihn immer auf einer trockenen Trägeroberfläche auf.
4. Überprüfen Sie den Positionierer vor dessen Nutzung immer auf Zeichen von Beschädigungen. Bei Schäden darf er nicht benutzt werden.
5. Entfernen Sie das Produkt, wenn es für eine Operation ungeeignet ist.
6. Wenden Sie keine Neigeposition an, ohne den Patienten vorher sicher am Operationstisch angegurtet zu haben.
7. Unebene Oberflächen können die Gliedmaßen belasten, was zu Verletzungen des Patienten führen kann.
8. Vermeiden Sie während Operationen eine ungewöhnliche und übermäßige Belastung der Produkte, da dies nachteilige Auswirkungen auf die Patienten zur Folge haben könnte.
9. Vermeiden Sie hohen Druck auf Kontaktflächen an Knochenvorsprüngen der Patienten.
10. Stellen Sie sicher, dass das Hinterhauptbein immer in der Vertiefung des Positionierers liegt.
11. Stellen Sie bei Benutzung des Positionierers vor der Operation sicher, dass der Patient in einer natürlichen Position gelagert ist.
12. Bewegen Sie den Kopf des Patienten auf dem Produkt regelmäßig, um ein Wundliegen aufgrund des Drucks zu verhindern.
13. Benutzen Sie die Positionierer nicht an der Eingriffsstelle.
14. Platzieren Sie den Positionierer nicht an Stellen, an denen Hautverletzungen durch Reibung entstehen können.
15. Vermeiden Sie Flüssigkeitsansammlungen, die die Haut des Patienten reizen könnten.
16. Prüfen Sie, ob Feuchtigkeit oder Ödeme auf der Haut des Patienten entstehen.
17. Vermeiden Sie elektrostatische Entladung und Zündquellen.
18. Entsorgen Sie das Produkt gemäß den Verfahren für die Abfallentsorgung in Krankenhäusern.
19. Der Positionierer kann bei Röntgenaufnahmen und bei CT-Scans angewendet werden.
20. Vor dessen Anwendung sollte das Produkt bei Raumtemperatur gelagert werden.
21. Während der Einlagerung sollten keine schweren Gegenstände auf dem Positionierer abgestellt werden.
22. Reinigen Sie die Produkte nach deren Nutzung mit in Krankenhäusern üblichen Desinfektionsmitteln.
23. Weichen Sie das Produkt bei der Reinigung nicht in Desinfektionsmittel ein. Wischen Sie das Produkt nach dessen Nutzung mit Desinfektionsmittel sauber.
24. Setzen Sie den Positionierer keinen hohen Temperaturen aus.
25. Vermeiden Sie Kontakt mit scharfen Objekten am Produkt.
26. Entsorgen Sie den Positionierer bei Anzeichen von Verschleiß in dessen Funktion oder bei Beschädigungen des Produkts.
27. Gassterilisation, Autoklavieren, Maschinenwäsche und -trocknung sind für dieses Produkt nicht empfohlen.
28. Bewahren Sie zum späteren Nachschlagen eine Kopie der Gebrauchsanweisung in Ihren Akten auf.
29. Im Falle von Fragen und Unklarheiten kontaktieren Sie bitte das VascoCare Medical Team oder Ihren Vertriebspartner vor Ort.



Vertrieb in Österreich
RUDOLF HEINTEL GESELLSCHAFT M.B.H.
Erdbergstraße 166, 1030 Wien
T +43 (1) 403 89 56-0
F +43 (1) 403 89 56-50
medizintechnik@heintel.at

